

# ROBOLEX

Le système de modelage corporel **TOUT-EN-UN** le plus moderne

## TECHNOLOGIE 4 EN 1

- CAVITATION AVEC ULTRASONS
- RF BIPOLAIRE ET MULTIPOLAIRE
- LASER BAS NIVEAU
- MASSAGE PAR LE VIDE



# ROBOLEX 4 EN 1


Synergie de courant multipolaire à haute fréquence, de vide et de cavitation contre la cellulite et pour le modelage corporel.

## CAVITATION AVEC ULTRASONS

Le principe repose sur l'augmentation du coefficient d'atténuation équivalent des tissus résultant de la formation de bulles de cavitation. Les ultrasons atteignent mieux les adipocytes des zones profondes qu'un traitement classique par radiofréquence qui produit une réaction thermique du tissu conjonctif.

## TRAITEMENT PAR FRÉQUENCE RADIO MULTIPOLAIRE ET BIPOLAIRE AVEC VIDE

La radiofréquence multipolaire dernière génération envoie de l'énergie thermique dans les couches profondes de la peau, grâce à l'utilisation d'ondes électromagnétiques pour déclencher les processus physiologiques. L'utilisation du traitement offre des résultats efficaces sur la cellulite, le modelage corporel et la régénération des tissus. La radiofréquence bipolaire agit en surface et sur les couches profondes de la peau comprises entre 5 et 10 mm, pour favoriser l'élimination des adipocytes. La combinaison de la radiofréquence, du massage par le vide et de l'aspiration ne présente aucune complication et produit des améliorations de l'aspect général de la cellulite et des modifications de la peau, ce qui signifie que d'autres traitements de routine assurent la satisfaction du client et des résultats durables.

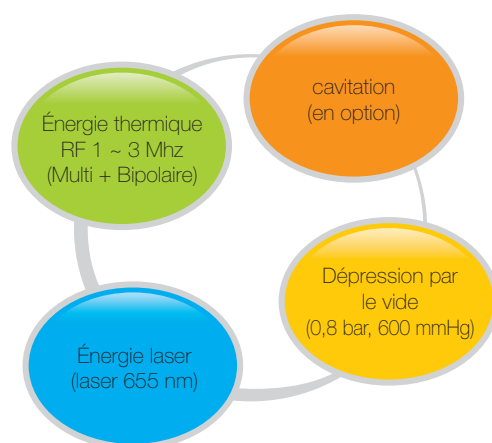

Visage



bras/jambe/cuisse



ventre/hanche



CORPS



RV-25



RV-60




RV-90



CAVI-38 (en option)

La structure cellulaire est stimulée 5 mm sous la peau à l'aide du laser bas niveau (655nm), ce qui permet une meilleure élimination des cellules adipeuses. La radiofréquence pénètre jusqu'à 15 mm sous la peau et chauffe le tissu conjonctif, ce qui entraîne un gonflement et une stimulation de la structure des tissus qui lisse visiblement la peau. Grâce à la dépression générée par le vide, le système lymphatique est activé et facilite l'élimination des toxines.

## POSSIBILITÉS DE TRAITEMENT

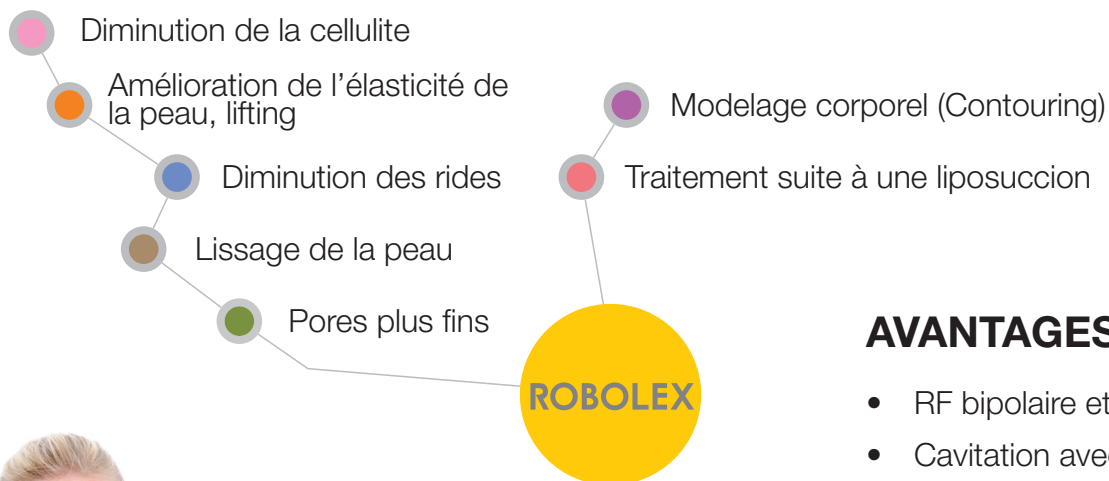

## AVANTAGES

- RF bipolaire et multipolaire
- Cavitation avec ultrasons
- Laser 655 nm
- Vide



## APERÇU

### MÉTHODE

Traitement des amas graisseux avec la thérapie multi-fonction (RF+Endermologie+Laser).

### FONCTION- NALITÉS

Remodelage corporel grâce à la diminution sélective des adipocytes et de la cellulite avec un traitement non-invasif.

### THÉORIE

Destruction des adipocytes en combinant dépression et cavitation par ultrasons.

### SÉCURITÉ

Traitement par lipolyse global, sûr. Non-invasif, sans opération ni injections.

### EFFICACITÉ





Réduction significative des mensurations après 3 à 4 traitements.



## RÉSULTATS DU TRAITEMENT

AVANT

APRÈS

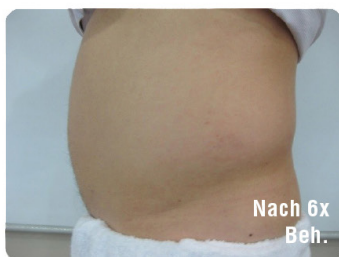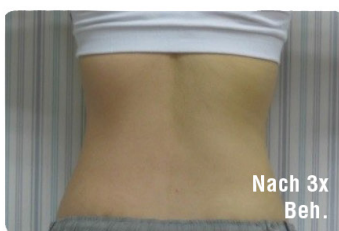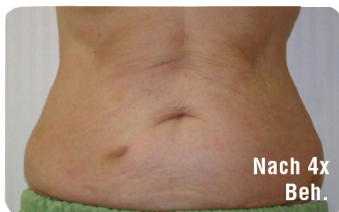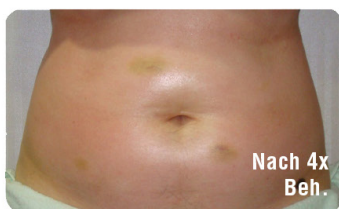

### DONNÉES TECHNIQUES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tension :                 | AC 110 à 220 V, 50/60 Hz                                  |
| Consommation électrique : | Max. 500 VA   |
| Puissance de sortie RF :  | 20 W (at. 500 Ω)  |
| Fréquence de sortie RF :  | RV95, 60 : 1 MHz à 1,8 MHz                                |
| RV25 :                    | 2 MHz à 3 MHz<br>(adaptation automatique de la fréquence) |
| Type de sortie RF :       | RV95, 60 : Multipolaire                                   |
| RV25 :                    | Bipolaire   |
| Vide :                    | Max. 0,8 bar (600 mm Hg)<br>(Pompe AC max 2,1 bar)        |
| Laser :                   | Laser : RV95, 60 : 655 nm (3 mW)                          |
| Ultrasons :               | 38 khz  |



LA SOCIÉTÉ CDP SWISS AG, RÉPUTÉE POUR SES SOLUTIONS D'AVANT-GARDE DANS LE DOMAINE DES SOINS MÉDICAUX ET DE BEAUTÉ, S'EFFORCE DE RÉPONDRE AU MIEUX AUX BESOINS DE SES CLIENTS.

NOUS FAISONS PAR CONSÉQUENT EN SORTE DE NE RECOURIR QU'À DES PRODUITS DE QUALITÉ ET DE MARQUE RECONNUS ET RESPECTUEUX DES NORMES EXIGEANTES PRÉVALANT EN SUISSE ET EN EUROPE.

**CDP SWISS AG**  
Weinbergstrasse 22  
8001 Zürich  
Suisse

T +41 43 538 57 45

E [info@cdpswiss.com](mailto:info@cdpswiss.com)  
W [www.cdpswiss.com](http://www.cdpswiss.com)

**CE**  
0120